




準備した物

- :コーナーンで販売している噴霧器 ¥3,500
- :外置き単体 超音波スケーラーなどに水を取るカチット ¥3,000
- :ゴム管とカチットをつなぐ竹の子接手 ¥495



竹の子Cuゴム管接手 (315-1600)  ¥495

商品コード	品名	写真	標準価格
	JANコード		
3151500	ワンタッチ接手 オス 新型 CU10-2		3,000
4548213223244			

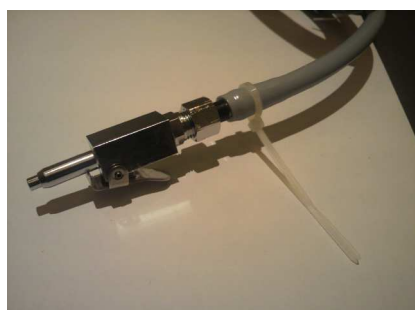

噴霧器ホースのノズル近くをカット  
準備した水カチットをつけて結束バンドで締め付け  
水の取り口へ差し込んで終了

**使用するにはまず 各診療台の床からの給水元バルブを閉める  
(給水元バルブが閉まっていなくて水がバルブへ逆流するかも)**

この方法で給水を取る事は薬事法の許可を取ってないので  
先生方の判断でご使用ください。

